

ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

557A kozmetikai karosszék küvettákkal



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024


A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolítottak.
2. Győződjön meg róla, hogy az ülés működőképes.
3. Helyezze a kozmetikai szék oda, ahol használni fogják.

Megjegyzés! Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad a kozmetikai szék közelében játszani.


Méretetek:



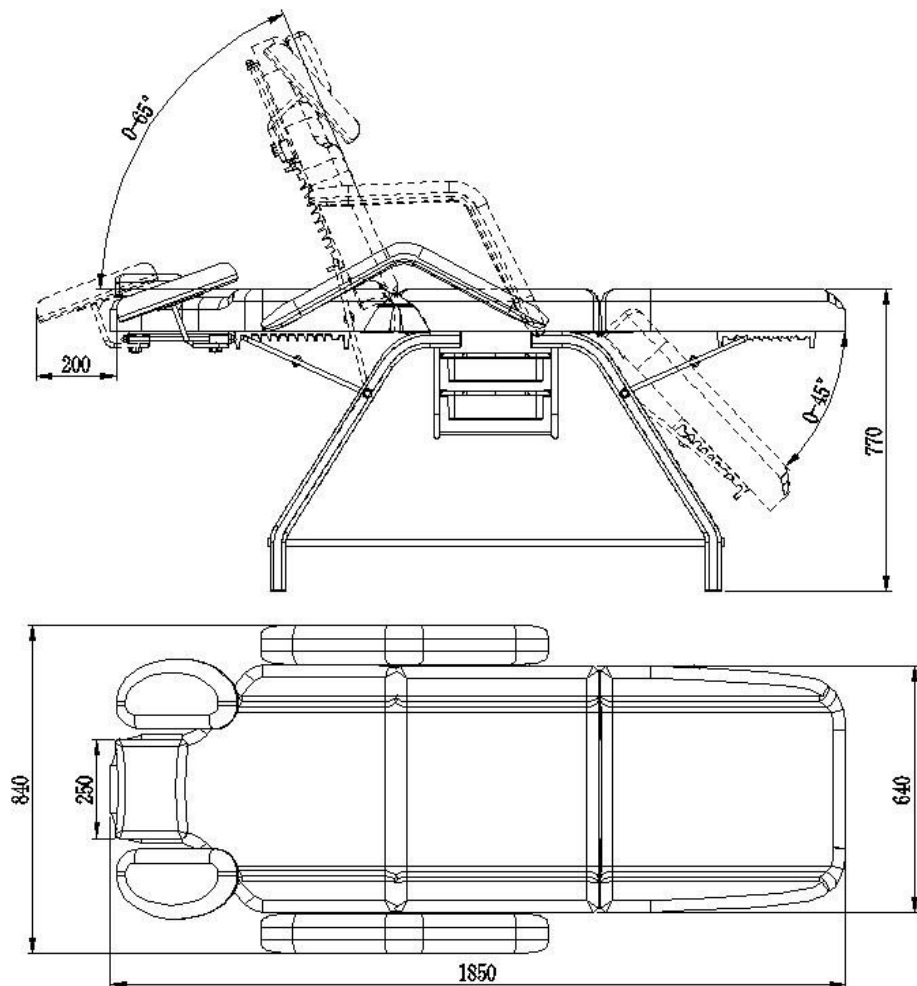


A készülék telepítési utasításai:

Szerelje be a székkeretet. Fektesse a kanapét egy sima, stabil felületre, majd csavarokkal rögzítse a székkeretet a kanapéhoz. Helyezze fel egymás után a lapos hordozót (1), majd a csatlakozót (2) és a csavart (3).

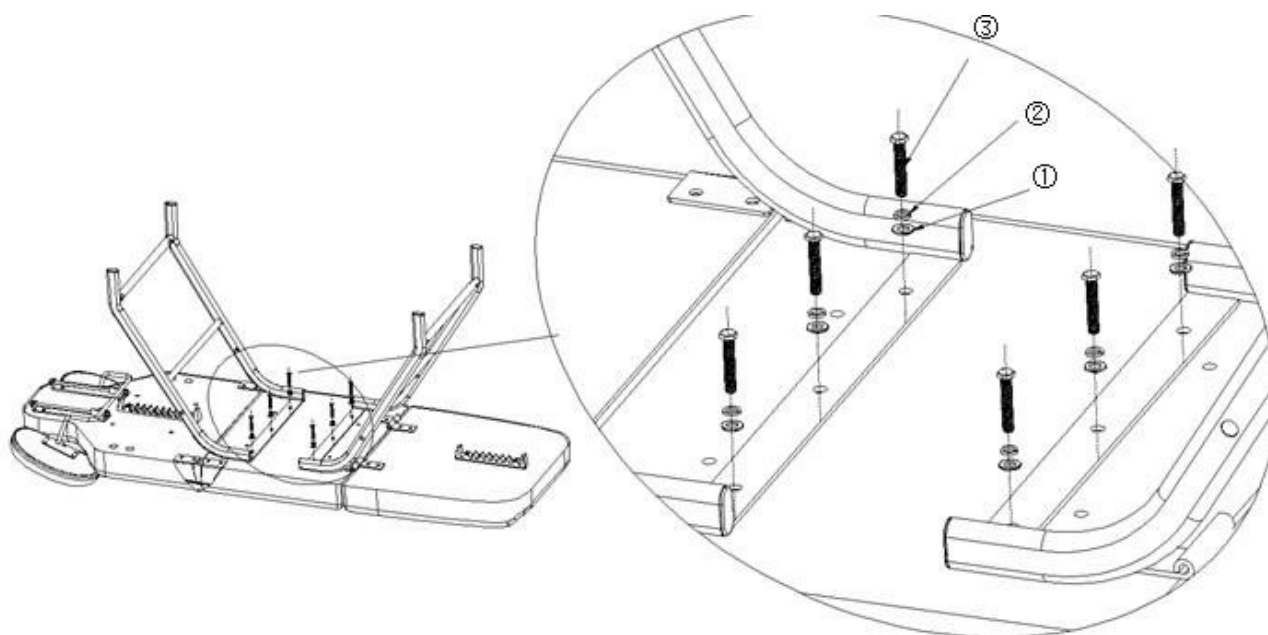


Szerelje be a tálcátartót:


Helyezze a tálcátartót a keretre, és rögzítse csavarokkal.

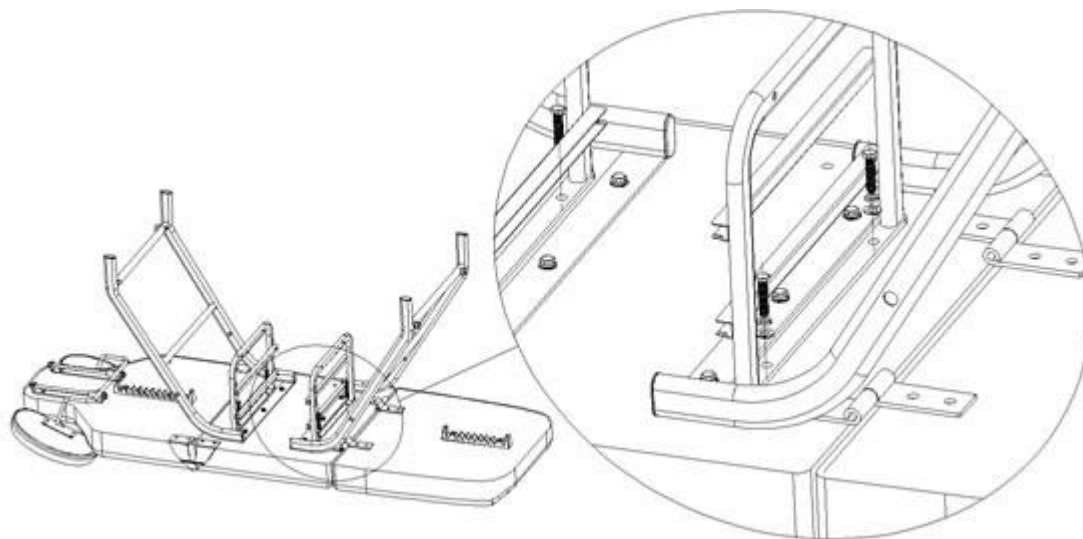

Ezután csatlakoztassa a tálca tartóját az összekötő csőhöz, és csavarokkal húzza meg, ahogy az alábbi képen látható.

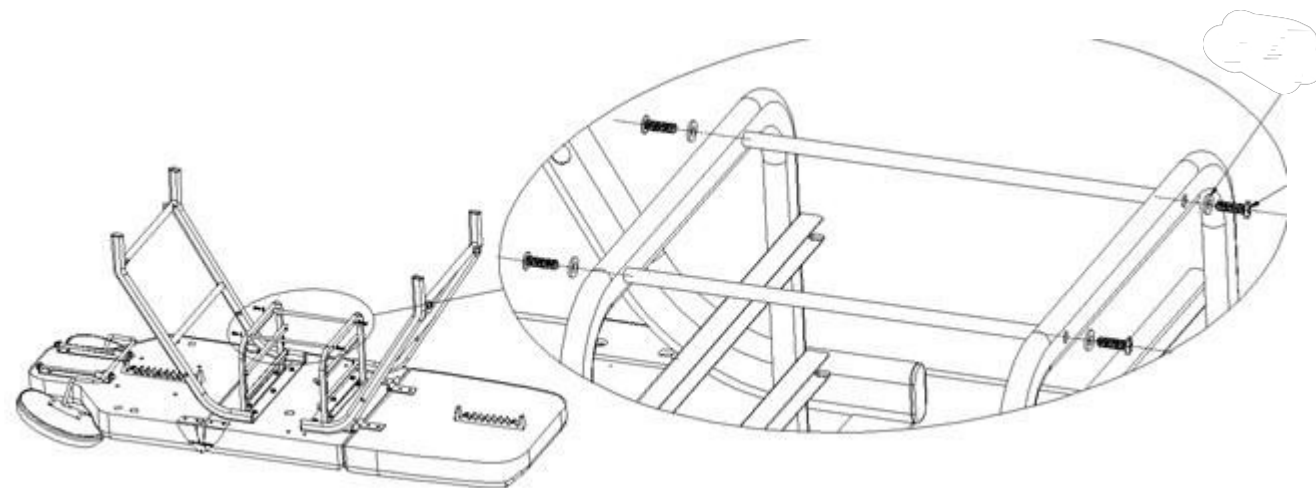


Rögzítse a székkeret összekötő rúdját: rögzítse az összekötő rudat a széklábakon lévő 4 lyukhoz csavarok

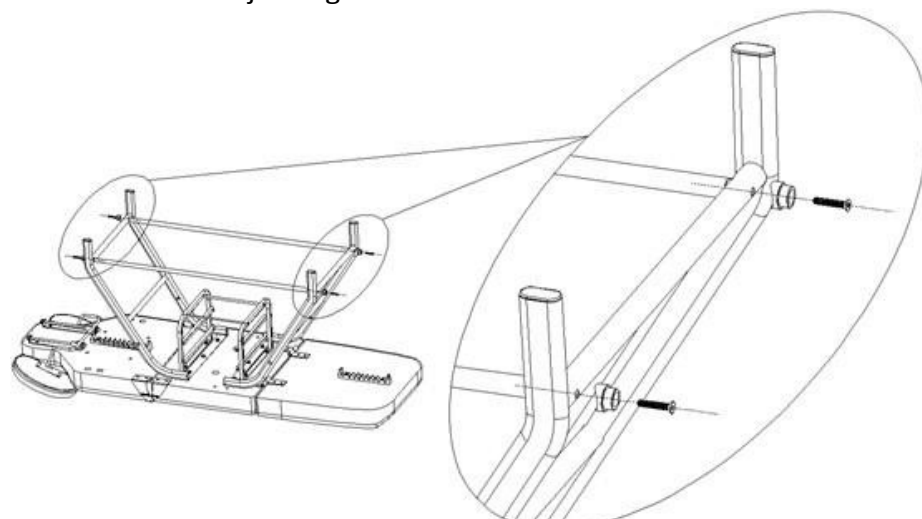


segítségével.

Szerelje fel a háttámla- és lábtámla-szabályozókat a széklábak mindkét oldalára csavarok segítségével.

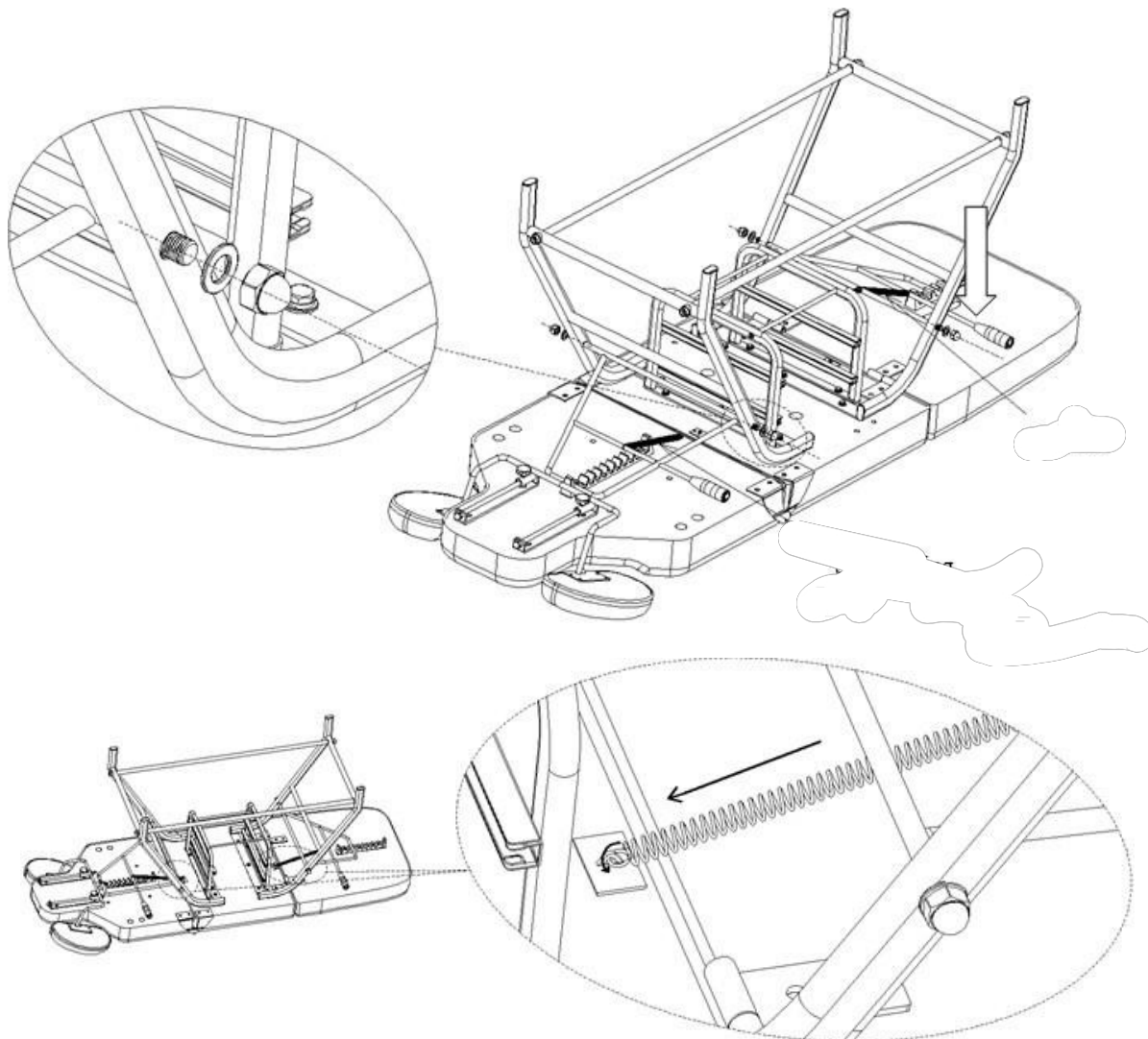


Szerelje be a kartámasz gombját

Írányítsa a gombot a kartámasz rögzítőfuratához, és húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba. Lazítsa meg a gombot a kartámasz pozíciójának áthelyezéséhez a képen látható módon.

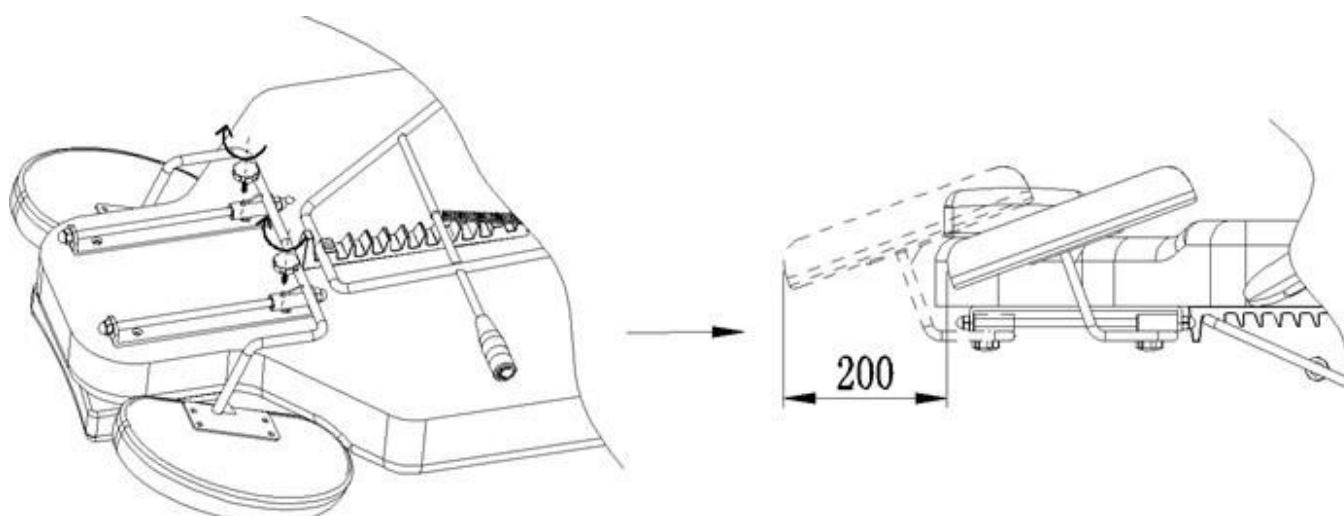


Karbantartó felszerelése:

Csúsztassa a kartámaszt a háttámla oldalán található lyukba. A kartámasznak biztonságosan rögzülnie kell. Csavarja el az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

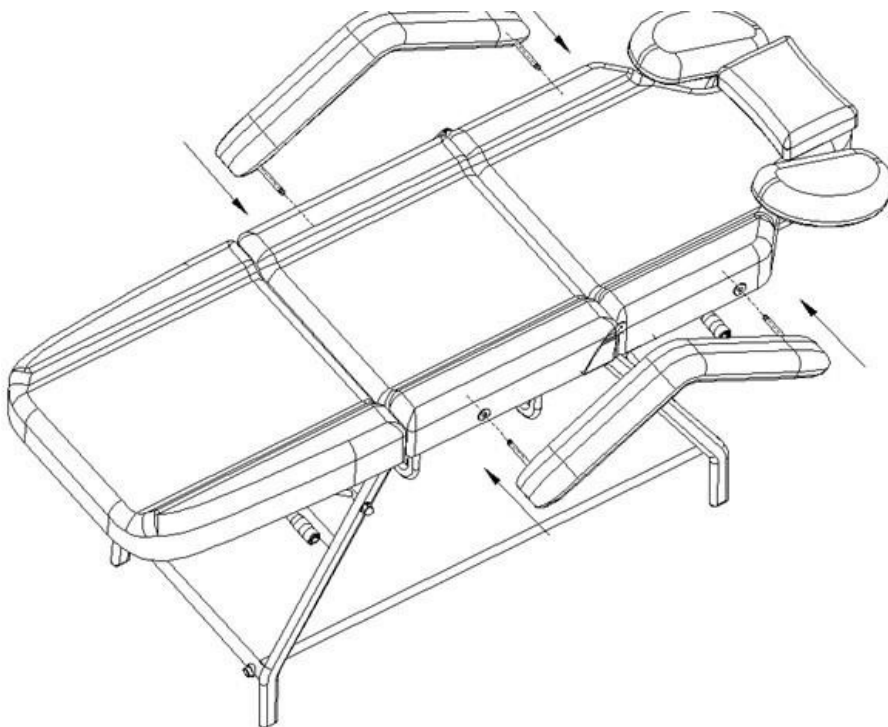

Telepítse a tartályt az alábbi képen látható módon. Csúsztassa a tartályt az ülés alatt található vezetőkbe.

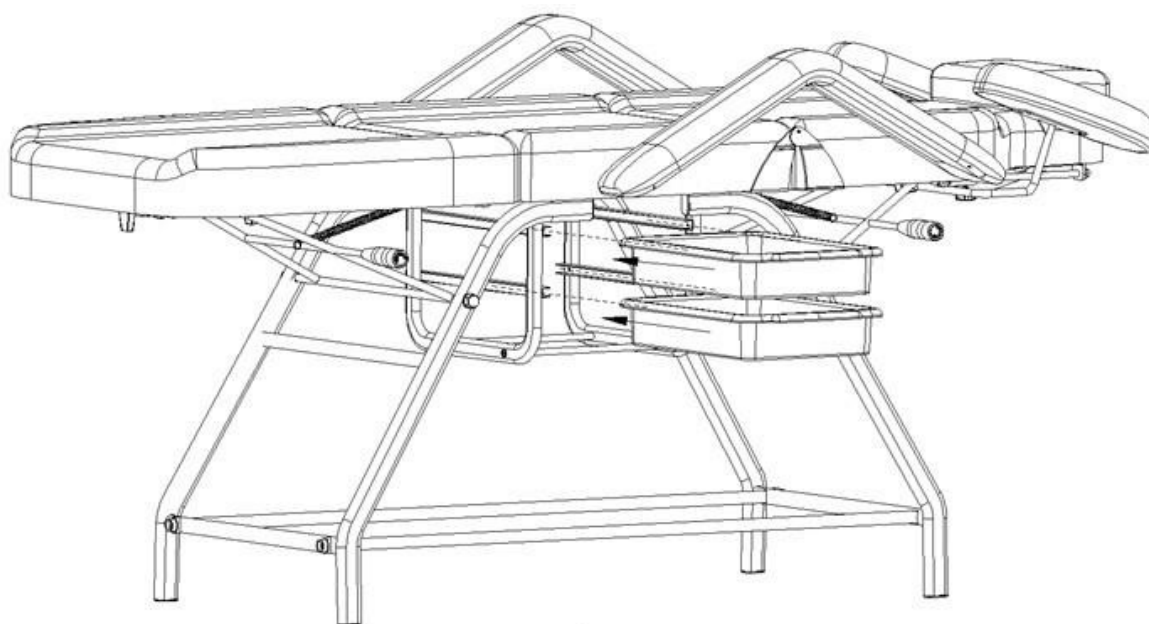

Székfunkciók:

1. Háttámla emelés

A háttámla és a lábtartó szögének beállítása kézi karral lehetséges. Mind a háttámla, mind a lábtartó külön karral rendelkezik, így mindkét rész magassága külön állítható. Ez lehetővé teszi a szék egyéni beállítását az ügyfél igényeihez, hogy az elvégzett kezelés a lehető legkényelmesebb legyen. A szék egészen a fekvőhelyzetig kihúzható.

A háttámla felemeléséhez fogja meg a kart, emelje fel, és állítsa be az Ön által kívánt magasságba.

2. A háttámla leengedése

Fogja meg az ülés háttámláját, miközben a másik kezével megfogja a kar fogantyúját, és engedje lefelé, amíg el nem éri a kívánt pozíciót. Amikor elérte a kívánt magasságot, engedje el a kart.



A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

- A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Havonta egyszer ajánlott alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

- A fém- és műanyag felületek, valamint a kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acélfelületek

- A tisztítás enyhe mosószeres oldattal a legjobb. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV Ülőfelület

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét egy speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldási módszerek
Furcsa zaj közben a címet használja.	Laza csavar	Húzza meg a csavart

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították, vagy a készülék háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz - így elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokkal tisztában legyenek.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A következők védelme érdekében

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni, majd átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein. Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között.

°C. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek kitenni, illetve az időjárásnak kitenni.