

ACTIVESHOP®

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Kosmetologinis fotelis 557A su kiuvetėmis



Importuotojas:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Lenkija

www.activeshop.com.pl

A/04/2024 redakcija


Prieš naudodami kosmetinę kėdutę perskaitykite instrukcijas ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Įsitikinkite, kad visos pakavimo medžiagos pašalintos.
2. Įsitikinkite, kad sėdynė veikia.
3. Pastatykite kosmetinę kėdutę ten, kur ji bus naudojama.

Atkreipkite dėmesį! Vaikams ir nepatyrusiems asmenims draudžiama naudotis šiuo prietaisu. Vaikai turi būti prižiūrimi ir negali žaisti šalia kosmetinės kėdutės.


Matmenys:



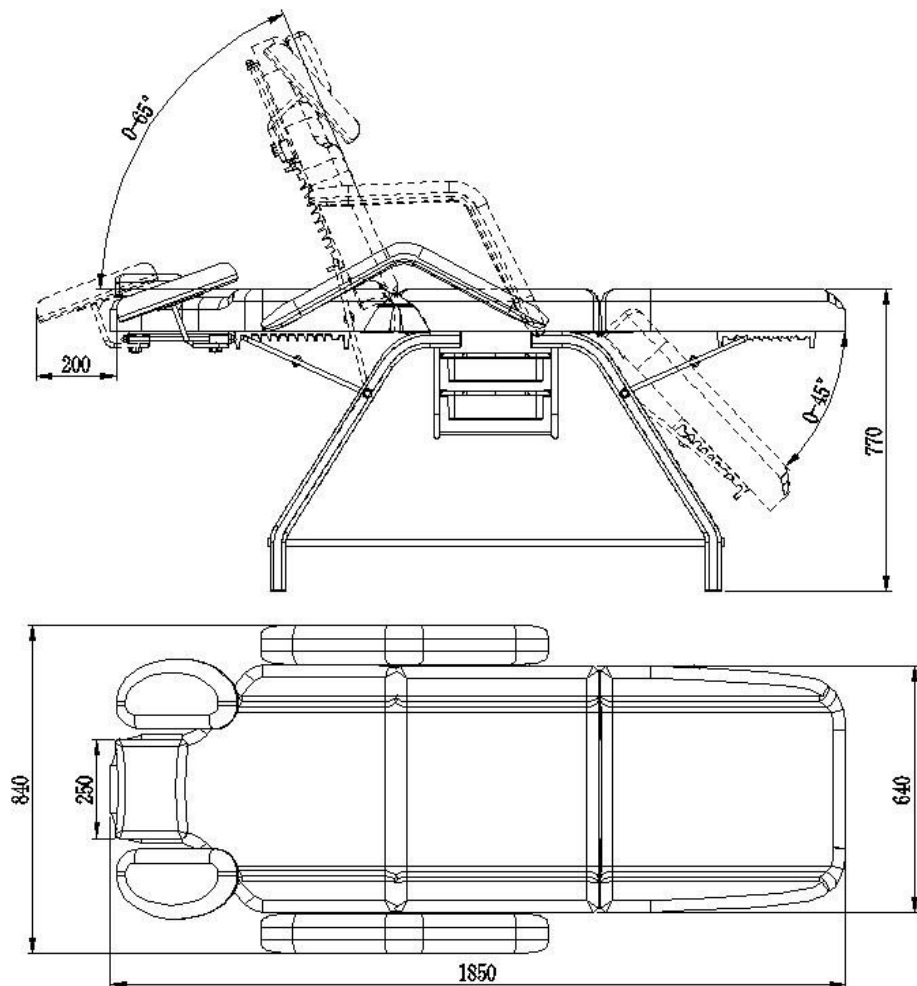


Įrenginio montavimo instrukcijos:

Sumontuokite kėdės rėmą. Paguldykite sofą ant lygaus, stabilaus paviršiaus, tada varžtais pritvirtinkite kėdės rėmą prie sofas. Iš eilės uždėkite plokščią laikiklį (1), tada jungtį (2) ir varžtą (3).

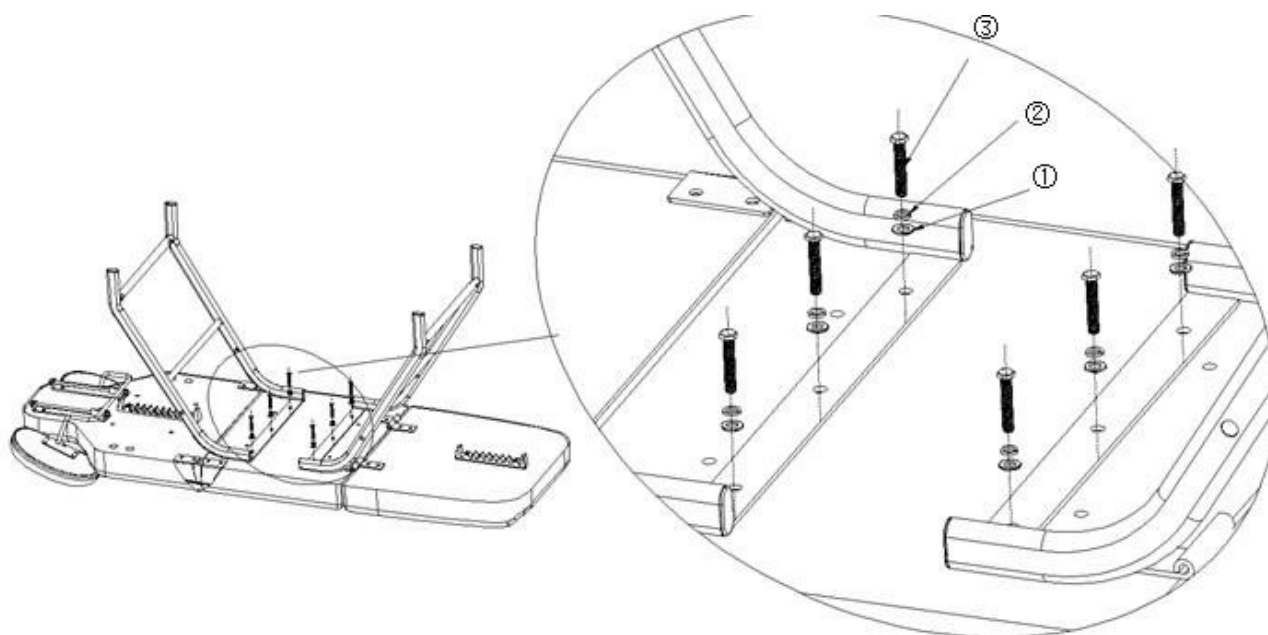


Sumontuokite dėklo atramą:


Padėklo atramą uždėkite ant rėmo ir pritvirtinkite varžtais.

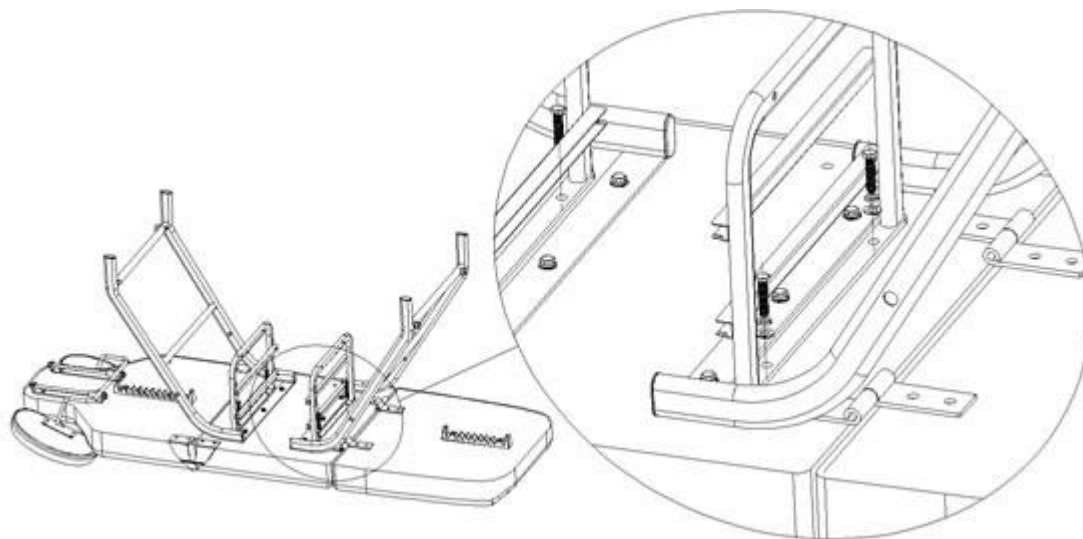

Tada prijunkite dėklo laikiklį prie jungiamojo vamzdžio ir priveržkite jį varžtais, kaip parodyta toliau pateiktoje nuotraukoje.

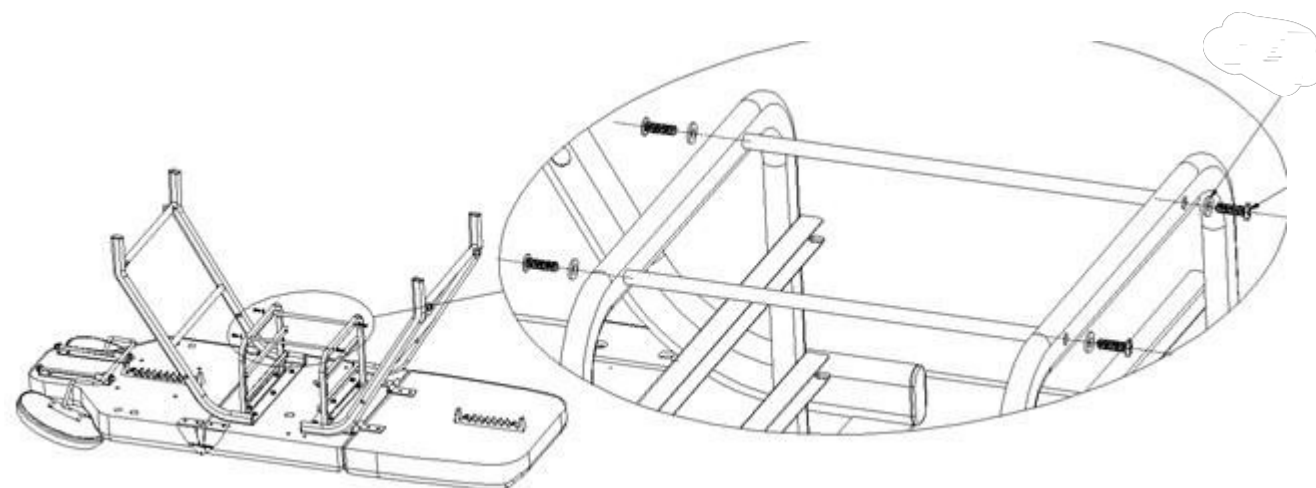


Pritvirtinkite kėdės rėmo jungiamąjį strypą: varžtais pritvirtinkite jungiamąjį strypą prie 4 kėdės kojose esančių

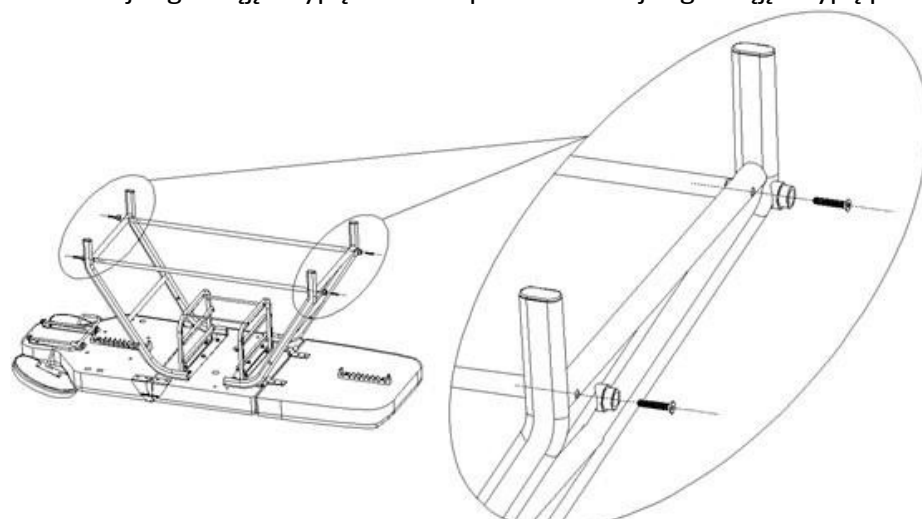


skylių.

Abiejose kėdės kojų pusėse varžtais sumontuokite atlošo ir kojų atramos reguliatorius.

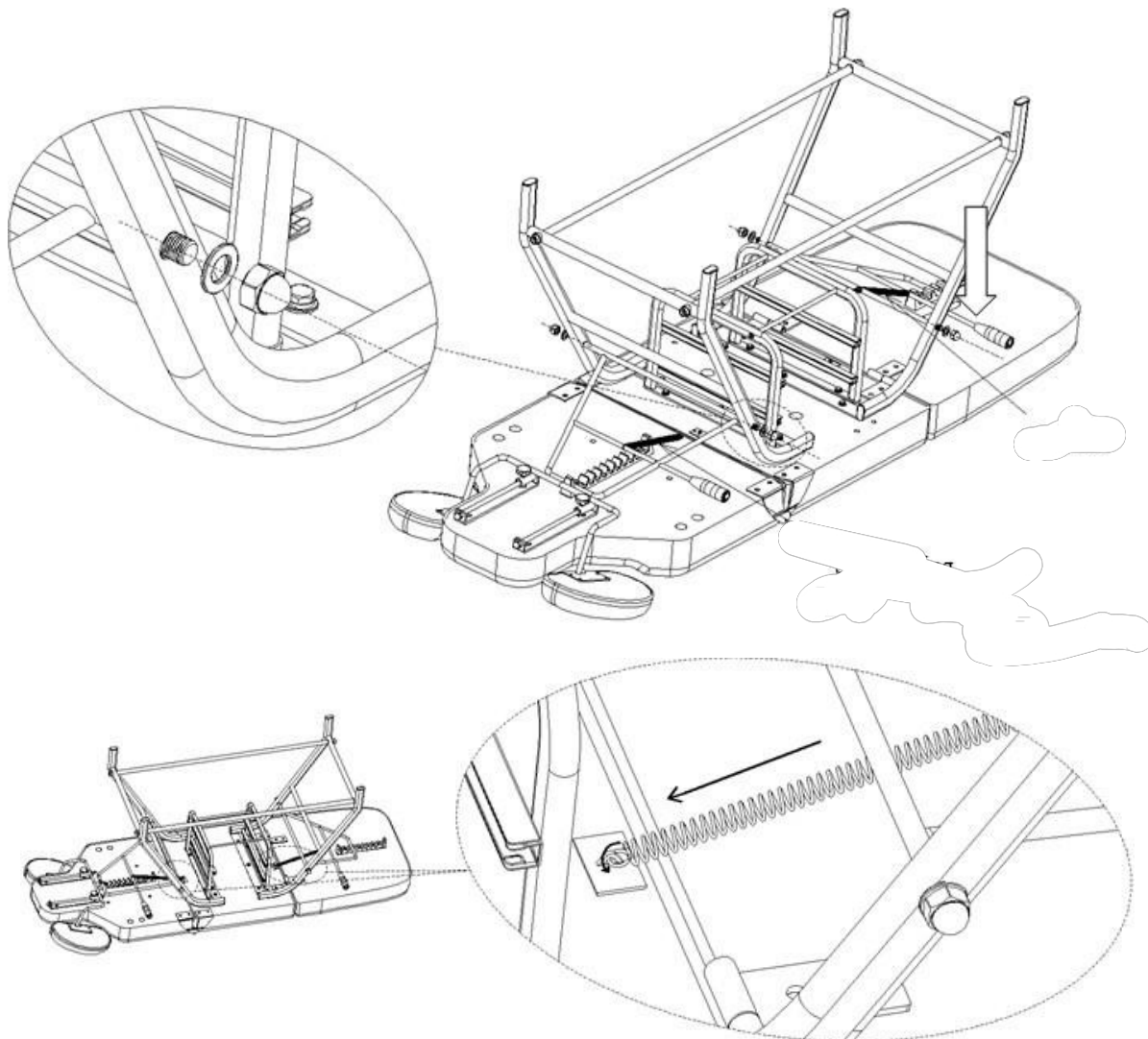


Įdiekite porankio rankenėlę

Nukreipkite rankenėlę į porankio tvirtinimo angą ir priveržkite pagal laikrodžio rodyklę. Atlaisvinkite rankenėlę, kad pakeistumėte porankio padėtį, kaip parodyta paveikslėlyje.

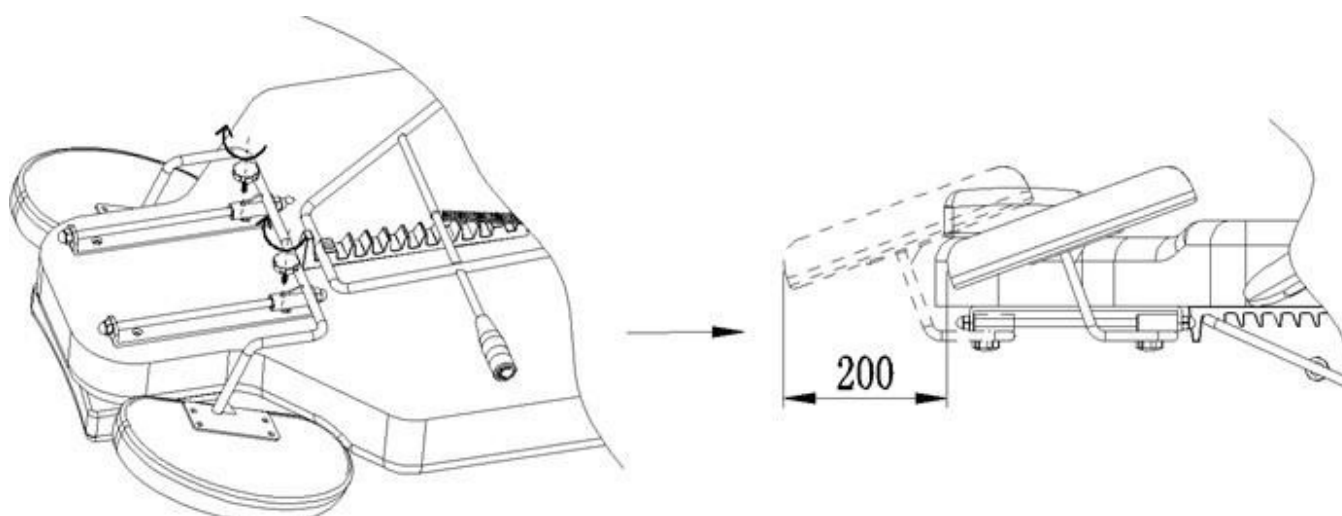


Porankio įrengimas:

Įkiškite porankį į atlošo šone esančią angą. Porankis turi būti patikimai pritvirtintas. Pasukite jį pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, kad tinkamai įsitvirtintų.

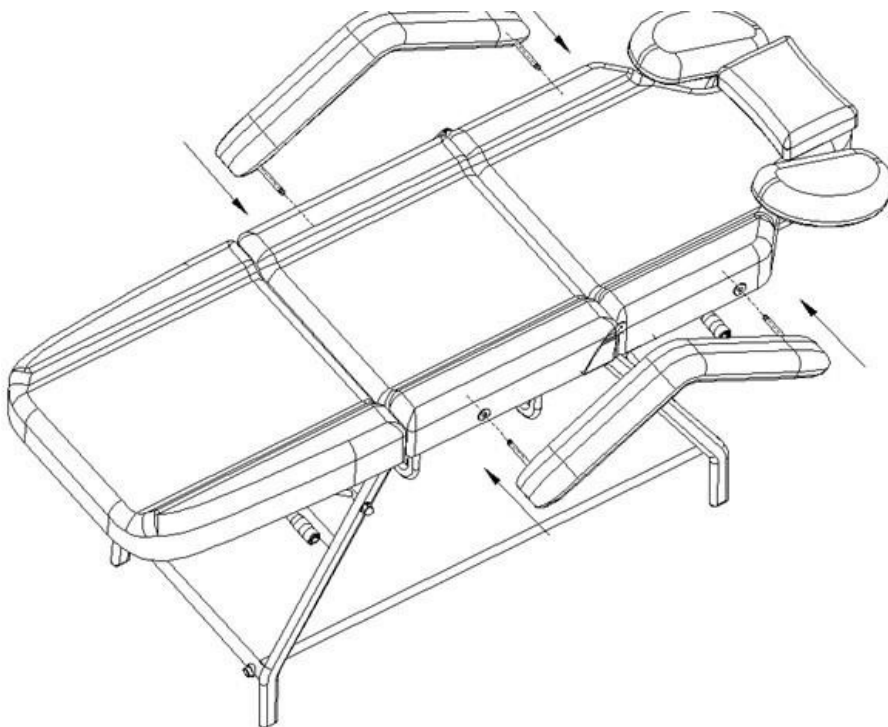

Sumontuokite talpyklą, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. Įstumkite konteinerį į kreipiamąsias, esančias po sėdyne.

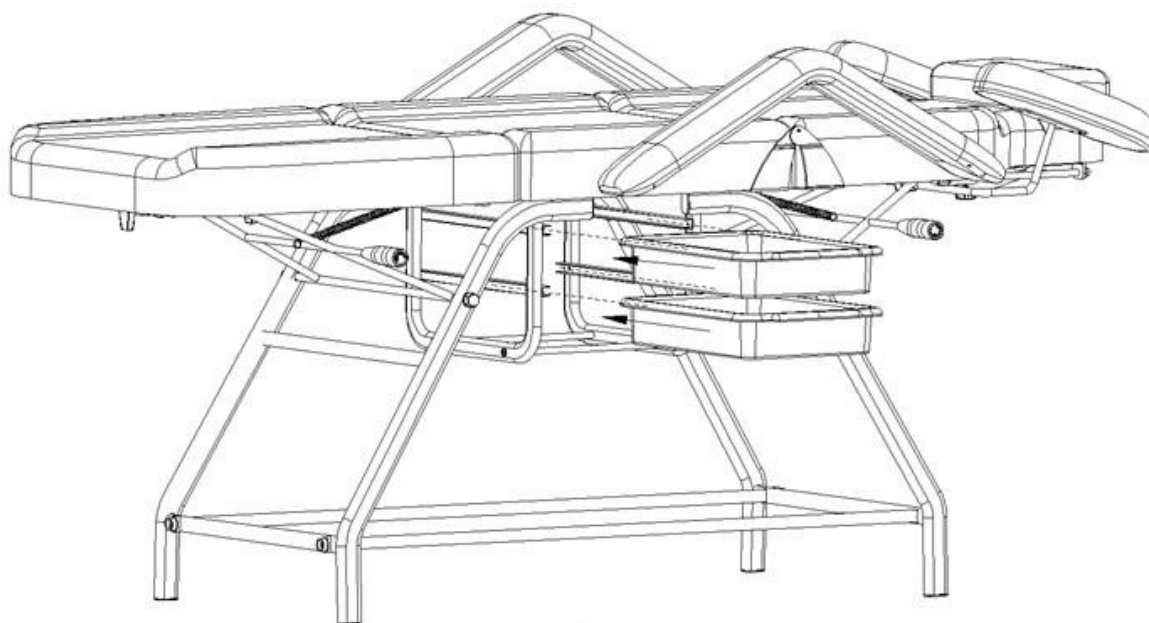

Kėdės funkcijos:

1. Atlošo pakėlimas

Nugaros atlošo ir kojų atramos kampus galima reguliuoti rankine svirtimi. Tiek atlošas, tiek kojų atrama turi atskiras svirtis, todėl kiekvienos dalies aukštį galima reguliuoti atskirai. Taip kėdę galima individualiai pritaikyti pagal kliento poreikius, kad gydymas būtų atliekamas kuo patogiau. Kėdę galima išskleisti iki pat gulimosios padėties.

Norėdami pakelti atlošą, patraukite svirtį, pakelkite ją aukštyr ir nustatykite pageidaujamą aukštį.

2. Atlošo nuleidimas

Laikykite sėdynės atlošą, o kita ranka paimekite svirties rankeną ir nuleiskite ją žemyn, kol pasieksite norimą padėtį. Pasiekę pageidaujamą aukštį, atleiskite svirtį.



Įrenginio valymas ir dezinfekavimas:

- Kad kėdės paviršius būtų geros būklės, jį reikia reguliariai valyti. Nepamirškite valyti ir dezinfekuoti kėdės po kiekvieno naudojimo. Rekomenduojama kruopščią dezinfekciją atlikti kartą per mėnesį.

I Metaliniai ir plastikiniai paviršiai

- Norėdami nuvalyti metalinius ir plastikinius paviršius bei valdiklius, nuvalykite juos drėgna šluoste. Sunkiai pasiekiamoms vietoms ar kampams valyti tinka nedidelis šepetėlis. Nenaudokite per daug skysčio prietaisui valyti. Tada dezinfekuokite prietaisą tinkamu skysčiu.

II Nerūdijančio plieno paviršiai

- Geriausiai tinka valyti švelniu ploviklio tirpalu. Stiprioms dėmėms pašalinti galima naudoti amoniaką ir daugumą tirpiklių. Venkite chloro turinčių tirpalų.

III Dažyti arba chromuoti metaliniai paviršiai

- Valymui nenaudokite vandens srovių (dušų, aukšto slėgio vandens patrankų).
- Nevalykite esant aukštai temperatūrai ir didelei drėgmei, taip pat n e l a i k y k i t e įrenginio tokiomis sąlygomis, kurios gali užteršti skysčiu.
- Valymui nenaudokite tirpiklių ar rūgščių.

IV Sėdynės paviršius

- Tolygiai nuvalykite sėdynės paviršių specialiu odos valikliu ir nušluostykite jį švaria, minkšta šluoste.

Problemų sprendimas

Problema	Priežastis	Sprendimo metodai
Keista triukšmas per naudojimą	Atsilaisvinęs varžtas	Užveržkite varžtą

SAUGUMO PRIEMONĖS

1. Šis prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos specialistų personalui, galima išvengti nepageidaujamo poveikio gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio šalia skysčių, drėgnose vietose arba su drėgnomis rankomis - kad į įrenginį nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Ltd. servisą:
a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nemontuokite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo kabelio.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Niekada neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite kabelį iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite įrenginio ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs įrenginys gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso veikimo trukmę, rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

PASTABOS:

1. Pažeidus maitinimo kabelį ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šią įrangą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi patirties ir žinių apie įrangą, jei jie prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų susijusią riziką.
3. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių, kaip naudotis prietaisu.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Neteisingas naudojimas arba sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti

aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, panaudoti elektros prietaisai turi būti surenkami atskirai, o po to perduodami į elektroninės ir elektros įrangos atliekų surinkimo punktus. Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų komponentų, todėl jie turi būti atiduoti perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat į ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įrenginys turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Įrenginys turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C

°C. Sandėliavimo ir transportavimo metu įrenginio negalima mėtyti ar mėtyti, jis negali būti veikiamas mechaninių smūgių ar oro sūlygų.